

Đề quý đồng nghiệp có tài liệu tham khảo về các hóa chất khử khuẩn đang sử dụng tại bệnh viện, chúng tôi gửi thiêu bài viết của BS.CKI Trần Thị Ngọc Lan, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn BVĐK Quảng Nam.

I. DUNG DỊCH RỬA TAY SÁT KHUẨN MICROSHIELD

1. Thành phần: Chlorhexidine Gluconate

2. Tác dụng:

- Diệt khuẩn nhanh, mạnh, phổ rộng.
- Phát huy tác dụng sát khuẩn ngay sau khi rửa đầu tiên.
- Tác dụng diệt khuẩn tích lũy qua các lần rửa.
- Hạn chế tác dụng diệt khuẩn kéo dài 6h sau (do tạo thành lớp phim bao bọc), tránh vi khuẩn mọc lại.
- Bổ sung chất làm mềm, làm ẩm da.

3. Các loại Microshield:

3.1. Microshield 4%:

- Chứa 4% CHG.
- Dùng để rửa tay trước và sau phẫu thuật, đỡ đỡ.

3.2. Microshield 2%:

- Chứa 2% CHG.
- Dùng để rửa tay trước và sau khi tiến hành các thủ thuật, thăm khám.





Handrub Holder

3.3. Dụng cụ rửa tay không dùng nước Microshield Handrub:



Được chỉnh sửa bởi: Nguyễn Thị Minh Hằng, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, ngày 12/08/2012. Người duyệt: Nguyễn Thị Minh Hằng, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, ngày 12/08/2012.



MICROSHIELD* PVP-S

Ch^o nh^o t, 12 Tháng 8 2012 10:10 - L^o n c^o p nh^o t cu^o i Ch^o nh^o t, 12 Tháng 8 2012 18:27





Để đạt được sự khử khuẩn hiệu quả, cần phải sử dụng đúng liều lượng và thời gian. Việc vệ sinh và khử khuẩn là một trong những biện pháp quan trọng để ngăn ngừa sự lây lan của vi khuẩn. Các sản phẩm khử khuẩn như PRESEPT có thể được sử dụng để khử khuẩn bề mặt, dụng cụ y tế, và môi trường. Việc sử dụng đúng cách sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng và bảo vệ sức khỏe của bệnh nhân.






Ortho-phthalaldehyde (OPA) và Gluteraldehyde (GTA)

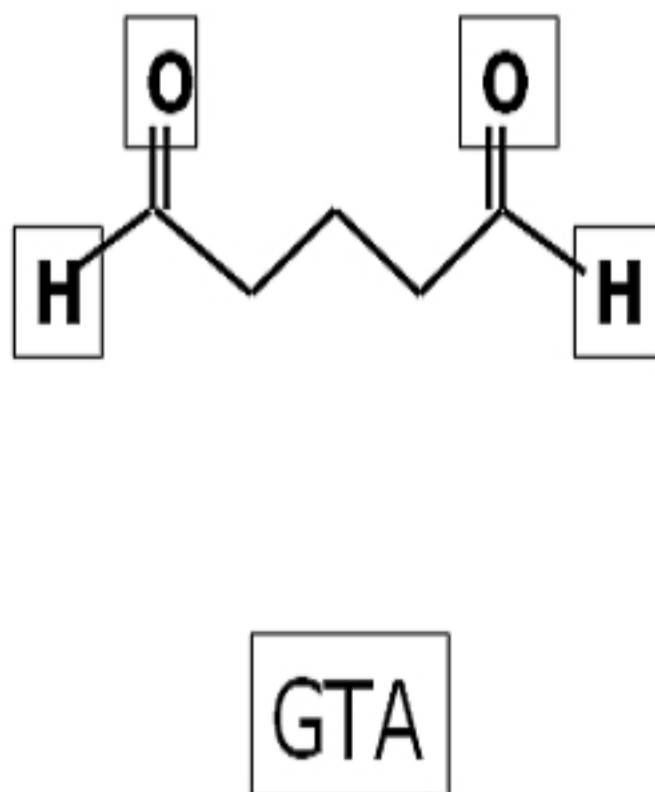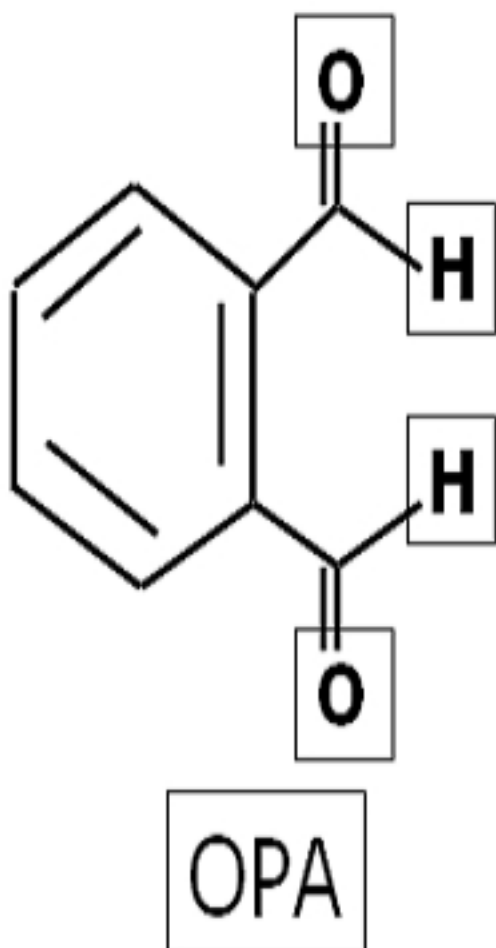

X. DUNG DỊCH TẠM VÀ GIDEZYME
Phong hóa khử khuẩn bề mặt, long khe kẽ mà không cần rửa;

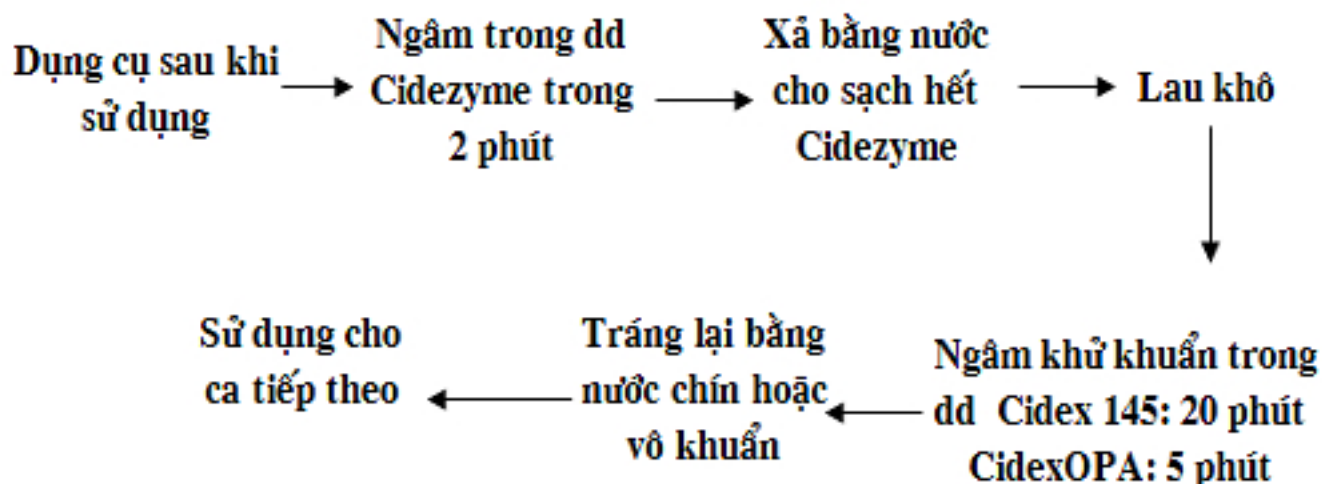

Quy trình xử lý dụng cụ

Được biên soạn bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tháng 04/2012