

KS Trần Anh Tú - 0

I. B O TRÌ LỖI L C

Bình lọc tạp chất 5 micro:

- Đnh k 03 tháng làm vệ sinh bình lọc và thay lõi lọc 1 lần (hoặc thay khi tr áp lọc > 1 bar)
- Tróc khi thc hi n ph i t t b m tr áp và b m R.O, khóa van n c c p vào b m t n l c, m v b n h l c, làm vệ sinh v b n h l c 5 micro b n g cách x t r a b n g vòi n c s ch có áp l c. Sau đó thay lõi lọc 5 micro m i vào v b n h, đ t s à n đ n h v đ ú n g v trí s i t ch t v b n h l c. Sau khi đã hoàn t t công vi c m van n c c p vào b m t n l c cho h th n g ho t đ n g tr i, n u có hi n t n g x i n c nên t t máy, ki m tra i v trí joan cao su trên n p bình, sau đó si t bulong n p bình i th t ch t s kh c ph c đ c.
- X h t không khí ra ngoài khi h th n g b t đ u làm vi c.

Bình lọc tinh 0.2 micro:

- Đnh k 01 năm thay lõi lọc tinh 0.2 micro m t l n hoặc đ n khi đ n g h áp l c tr c l i l c v t quá 3 kg/cm², các b c th c hi n gi n g nh trên bình lọc tạp chất 5 micro.
- Nh x gió bình lọc đ x h t không khí ra ngoài khi h th n g b t đ u làm vi c.



[Xem tiếp tại đây](#)

Quy trình báo cáo tình hình thực hiện công việc R.O cho chủ tịch nhân viên

Vị trí: Biên tập viên

Thứ 4, 29 Tháng 4 2020 10:40 - Lần cập nhật cuối: Thứ 4, 29 Tháng 4 2020 10:48
